



 **Incognito**<sup>TM</sup>  
Die unsichtbare Zahnspange

 **Incognito**<sup>TM</sup>  
Die unsichtbare Zahnspange

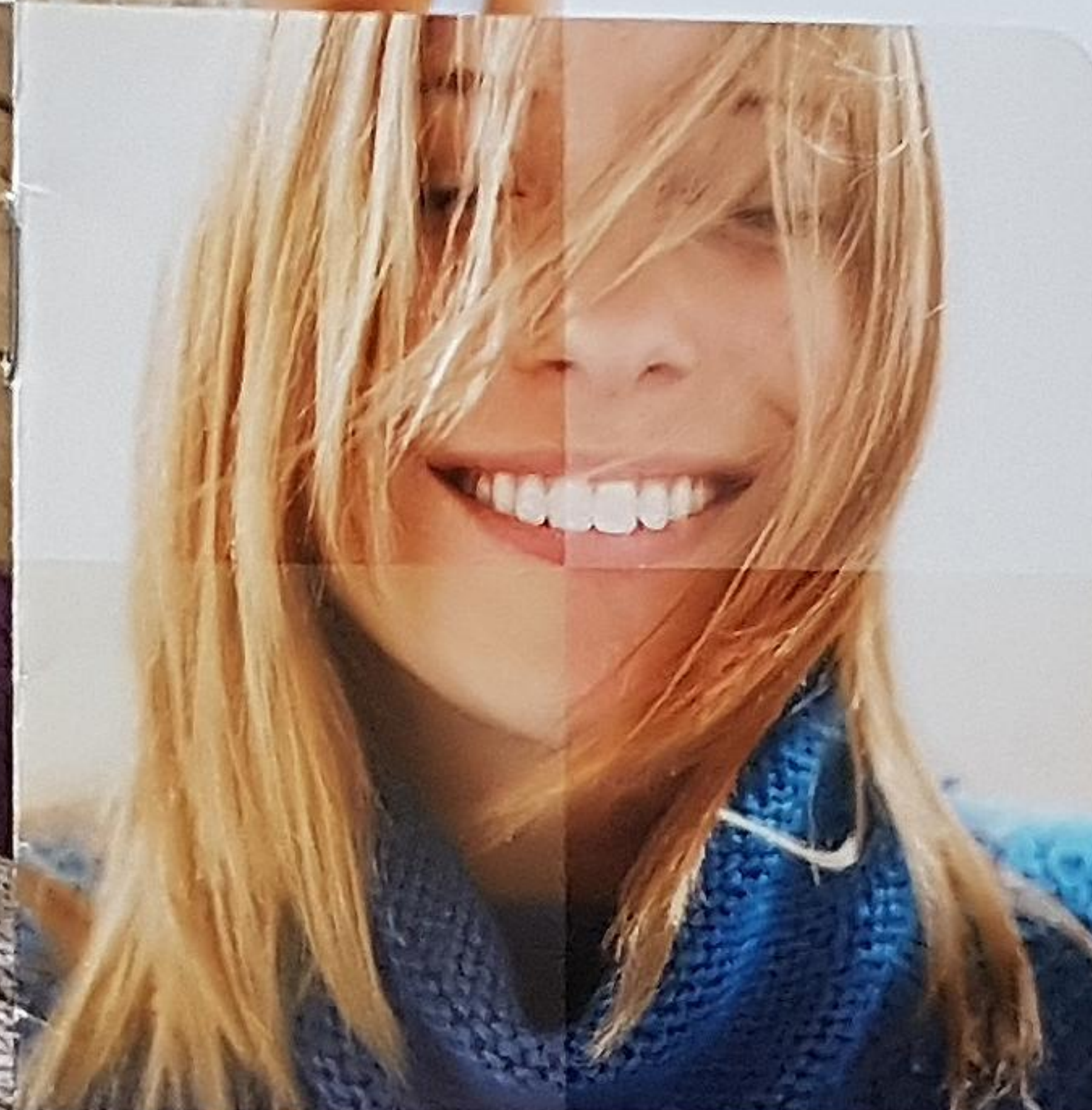

Das Geheimnis  
Ihres  
neuen  
Lächelns

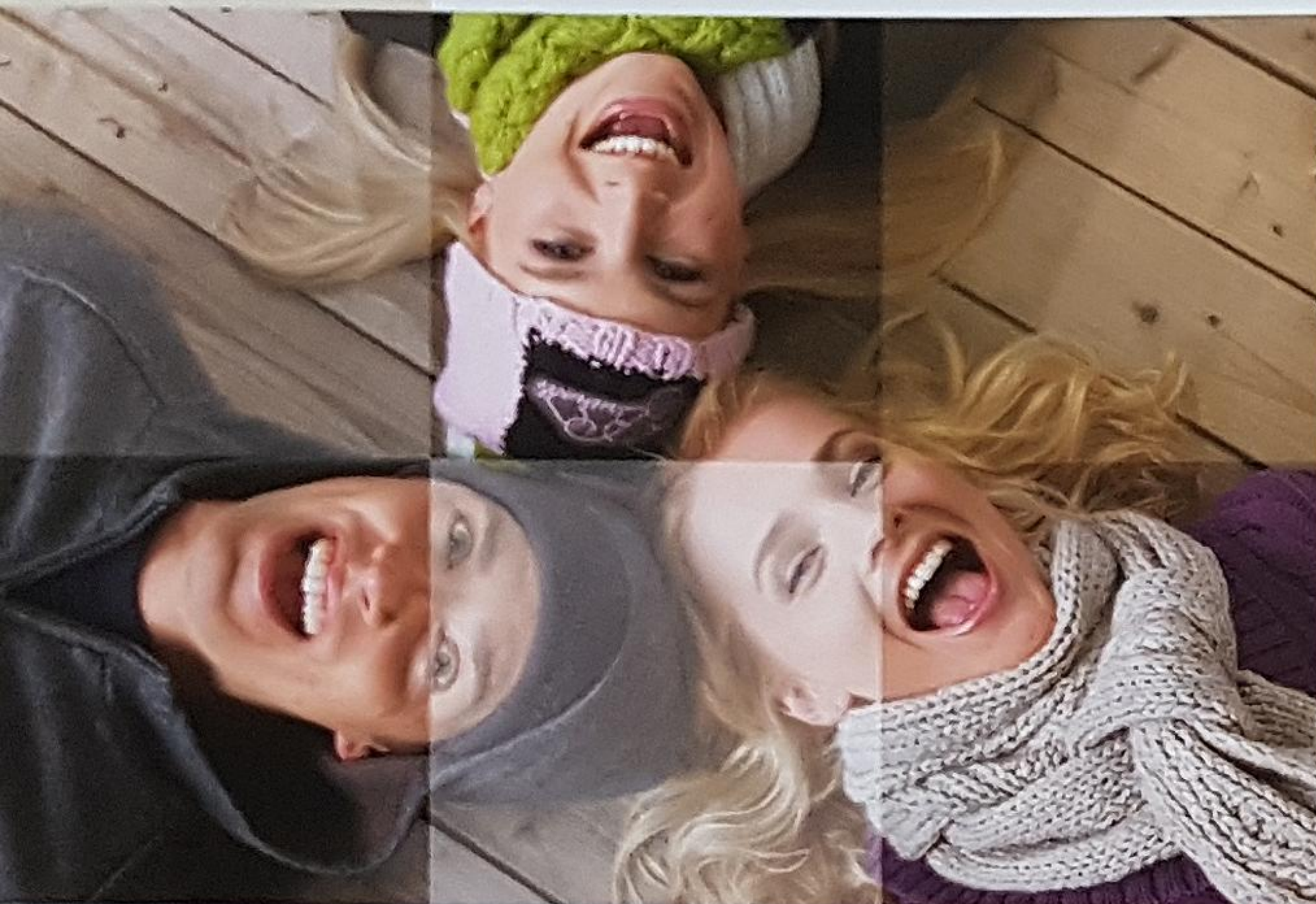

**Dr. Florian BOLDT**  
Fachzahnarzt für Kieferorthopädie  
Plätzle 3, 91550 Dinkelsbühl  
Tel. +49 9851 7675      [www.dr-boldt.de](http://www.dr-boldt.de)

**3M** Unitek

**3M Unitek**  
Zweigniederlassung der  
3M Deutschland GmbH  
Ohmstraße 3  
86899 Landsberg  
Tel.: +49 (0) 8191 9474-5000  
Fax: +49 (0) 8191 9474-5099  
[3MUnitekGermany@mmm.com](mailto:3MUnitekGermany@mmm.com)  
[3MUnitek.de](http://3MUnitek.de)

[3M.de/Zahnspange](http://3M.de/Zahnspange)



Incognito<sup>TM</sup> ist eine eingetragene Marke  
von 3M. Andere eingetragene Marken  
sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

Bitte recyceln. Gedruckt in Deutschland.  
© 2014 3M. Alle Rechte vorbehalten.  
DE080010

[3M.de/Zahnspange](http://3M.de/Zahnspange)

**3M** Unitek





# Schlaue Technik – verschönert Ihr Lächeln

Ein schönes Lächeln strahlt Souveränität, Vitalität und Selbstbewusstsein aus. Unabhängig, in welcher Lebenslage und welchem Alter Sie sich befinden.

Die Incognito™ Zahnspange ist absolut unsichtbar – sie versteckt sich praktisch hinter Ihren Zähnen. Keiner wird je erfahren, dass Sie eine Zahnspange tragen – außer Sie erzählen es.



*„Auch ich habe Incognito™  
vertraut – wie über 100.000  
andere Menschen auch.  
Zurecht: Heute kann ich  
wieder frei und unbefangen  
lächeln!“ (Nina, 33)*

## Vertrauen Sie einem System, das über **100.000** Menschen zum Lächeln gebracht hat

Unsichtbare Technik – sichtbarer Erfolg:

Geeignet für jedes Lebensalter

Von außen praktisch unsichtbar

Hoher Tragekomfort durch extrem flache Brackets –  
zu 100% individuell Ihren Zähnen angepasst

Kein Entkalkungsrisiko auf der Zahnvorderseite

Hochpräzise, robotergebogene Bögen  
ermöglichen ein ideales Ergebnis





# Die Zahnspange, die sich Ihrem Leben anpasst

Ihr Kieferorthopäde erstellt mit Ihnen einen individuellen Behandlungsplan. Auf seiner Grundlage werden Ihre Brackets und Bögen erstellt. Damit werden Ihre Zähne gerade ausgerichtet, und Sie können wieder unbefangen lachen.

Die individuell angefertigten Goldbrackets sitzen passgenau auf Ihren Zähnen und sichern damit einen maximalen Tragekomfort.



Die Brackets werden auf der Zahninnenseite befestigt und sind somit von außen nicht sichtbar.

Brackets allein können die Zähne nicht in die gewünschte Richtung bewegen, deshalb wird daran ein Bogen befestigt. Dieser Bogen passt exakt zu den Brackets und korrigiert die Zahnfehlstellung.



## HOHER TRAGEKOMFORT UND SICHERHEIT

- Das flache Profil der Brackets hat keinen Einfluss auf Ihre Aussprache.
- Brackets aus Gold sind frei von Nickel – damit wird das Risiko von Allergien verringert.
- Es gibt keine weißen Flecken auf der Zahnvorderseite.

## FÜR DIE LEICHTEN FÄLLE: INCOGNITO™ LITE BRACKETSYSTEM

Die unsichtbare Incognito™ Lite Zahnspange ist genau das Richtige für leichte Zahnfehlstellungen im Frontzahnbereich. Patienten berichten über schnelle, sichtbare Ergebnisse nach nur kurzer Tragezeit.



reddot design award  
winner 2012





# Häufige Fragen



## WIE ENTSTEHT MEINE ZAHNSPANGE?

- Zunächst wird ein Präzisionsabdruck Ihres Kiefers genommen und in die Produktionsstätte nach Bad Essen geschickt.
- Aus dem Abdruck wird ein exaktes Modell erstellt, die Grundlage für Ihre unsichtbare Incognito™ Zahnspange.
- In einem aufwendigen High-Tech-Verfahren entsteht nun Ihre individuell designte und für Sie gefertigte Incognito™ Zahnspange.

## Jetzt beginnt Ihre Behandlung

- Ihr Kieferorthopäde setzt die Incognito™ Zahnspange in Ihren Mund ein.
- Im nächsten Schritt wird der individuell hergestellte Bogen mittels kleiner Gummis an den Brackets befestigt.
- Im Rahmen der folgenden Behandlungen wird ein für Sie optimales Behandlungsergebnis angestrebt – schonend und unauffällig.

Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Kieferorthopäden und unter [3M.de/Zahnspange](http://3M.de/Zahnspange)



## MUSS ICH MICH AN MEINE NEUE INCOGNITO™ ZAHNSPANGE GEWÖHNEN?

Wie bei allen neu eingesetzten Zahnspangen benötigt man auch bei einer Incognito™ Zahnspange eine kurze Eingewöhnungsphase – zunächst entsteht ein Fremdkörpergefühl. Dieses Gefühl lässt aber in der Regel innerhalb der ersten zwei Wochen nach.

## WIE REINIGE ICH MEINE ZÄHNE UND DIE INCOGNITO™ ZAHNSPANGE?

Reinigen Sie Ihre Zähne wie bisher. Hier finden Sie weitere Informationen dazu: [3M.de/Zahnspange](http://3M.de/Zahnspange).

## GIBT ES ETWAS BESTIMMTES, WAS ICH NICHT ESSEN DARF?

Grundsätzlich darf alles gegessen werden. Bei harten Speisen (z. B. Karotten, Äpfeln, hartem Brot) und weichen, klebrigen Speisen (z. B. Kaugummi, Bonbons) sollte man allerdings etwas vorsichtiger sein.

